

清拭面積

ハイプロックスアクセルワイブは除菌洗浄剤の含浸量が一般的なウェットティッシュより多いため、清拭後も数分間湿った状態を保つことができ、細菌・ウイルスに十分に接触し効果的な**湿式除菌**が可能です。さらに1枚(15×17cm)あたりの清拭可能面積も**2㎡**(VIROX社データ)と広く使用量や廃棄物の軽減につながり経済的です。ワイブの素材は、丈夫で汚れの吸着能力が**極めて高い**メルトブローン不織布を採用しています。ディスポタイプなのでクロスコンタミネーションを防ぐには最適です。

注意事項

- スプレーボトルで清拭する際は対象物に直接噴霧せず、清潔なドライワイブやクロスなどに噴霧して使用してください。
- 塩素系**の商品と一緒に使用すると塩素ガスが出て**危険**です。
- 取扱時および希釈作業時には手袋を着用し、状況に応じてマスクや保護メガネを着用してください。
- 濃縮タイプの原液使用や用途以外には使用しないでください。
- 目・顔など人体や食器、食品には使用しないでください。
- ワイブにはミシン目がありますので1枚分取り出し、蓋を押し付けながら1枚を切ってお取りください。
- ワイブは水に溶けないため、トイレには流さないでください。
- 直射日光や高温の場所は避け、清潔な場所に保管しお子様の手の届かないところに保管してください。
- 乾燥を防ぐため、使用後は必ず蓋を閉めてください。
- 医療機器は基本的に外装のみに使用(内部は使用不可)、**使用前に必ず機器付属の『取扱説明書』を確認し**個別の注意事項があればそれに従ってください(不適合素材を使用している機器がある可能性もあります)。



製品仕様



ハイプロックスアクセル
(3.8L)



ハイプロックスアクセルRTU(1L)
※スプレーガン別売



ハイプロックスアクセルワイブ
(160枚)



スプレーボトル
(希釈用/672ml)



スプレーガン緑
(ハイプロックスアクセルRTU・
スプレーボトル用)



ポンプ(1oz・1/4oz)
※希釈計量用

商品名	商品コード	サイズ	内容	JANコード
VIROX ハイプロックスアクセル	VRX V15C4JN	3.8L	4本/1箱	4518319090194
VIROX ハイプロックスアクセルRTU	VRX V15R1JN	1L	12本/1箱	4518319090101
VIROX ハイプロックスアクセルワイブ(160枚)	VRX V15RWIPJ	15×17cm/1枚	12個/1箱	4518319090118
TOLCO スプレーガン緑	TLC 110248	—	—	—
TOLCO スプレーボトル	TLC 120119	672ml	—	—
TOLCO ポンプ(1oz)	TLC 160100	1oz(28ml)	—	—
TOLCO ポンプ(1/4oz)	TLC 160109	1/4oz(7ml)	—	—

teccs 東栄部品株式会社

<http://www.teccs-jp.com>



〒113-0021 東京都文京区本駒込6丁目3番6号

本 社 / TEL 03-3946-8111 札 幌 / TEL 011-271-3618

名古屋 / TEL 052-331-6791 大 阪 / TEL 06-6451-2871

福 岡 / TEL 092-434-3911

お問い合わせ



加速化過酸化水素 ハイプロックスアクセルシリーズ HYPROX ACCELE SERIES

医療・福祉・教育施設の環境整備に最適な
洗浄と除菌が一度で可能な除菌洗浄剤

Hospital
Disinfectant Cleaner



東栄部品株式会社