

W60020AM

ホスケアトイレ抗菌 (プレミアムタイプ)

吸収量：約600ml 1箱：20枚入 / 1カートン：18箱入
袋：65×38 cm / 箱：20×11.5×11.5 cm / カートン：42×37.5×36.5 cm
袋：ポリエチレン（抗菌加工） / パッド：高吸収性ポリマー、セルロース



- コンパクトで備蓄しやすい
- 袋内での菌の増殖を防ぐ
- パッドでかんたん凝固
- ひも付きの袋で簡単処理
- 気になる悪臭を軽減
- 院内感染予防に
- 尿を約600ml吸水&ジェル化
- ポータブルトイレの洗浄不要

ロール状で
箱がコンパクト



ベッドパンや
ポータブルトイレにも




使用方法


*トイレには流さないでください。



1 箱を開けて最初の一枚を切り離してください。中に入っているパッドが尿を吸収し固めます。

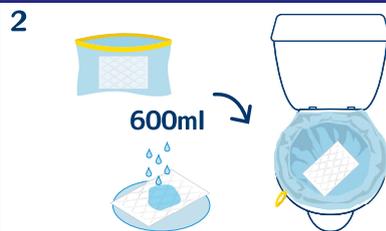

2 袋を便器もしくは便座にかぶせ、パッドを底面にセットし用をたしててください。

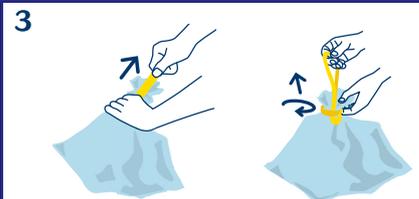

3 使用後は袋を外し、ひもを引っ張って袋を閉じます。念のため袋自体を縛ることをお勧めします。廃棄方法は自治体の指示にしたがってください。

第三者機関による試験 実施済

抗菌

袋自体に抗菌加工がされているので菌の増殖を抑えます。

**耐熱
耐冷**

耐熱温度110℃
耐冷温度-30℃が
証明されています。

**アンモニア
発生抑制**

尿を吸収し固めることで尿素などの悪臭の原因となる物質（アンモニア等）への変化を遅らせます。